

Reinigungs- und Pflegehinweise

Alle MEYRA Polsterteile und Bezugstoffe sind mit einem Label mit Wasch- und Pflegehinweisen ausgestattet. Bitte beachten Sie diese Hinweise bei der Reinigung Ihres Produktes.

Symbolik

Symbol	Erklärung
	Sehr schonendes Waschen bei 30 °C. Fein- oder Wollwaschgang
	Waschen in der Waschmaschine bei 60 °C
	Nicht im Trockner trocknen
	Nicht bügeln
	Nicht bleichen
	Keine chemische Reinigung
	Europäische Konformität

Reinigung und Desinfektion

Vor dem Reinigen und Desinfizieren des Rollstuhles muss loser Grobschmutz, wie z.B. Lebensmittelrückstände, Haare im Bereich der Lenkrollen oder starke Verschmutzung, entfernt werden. Anschließend kann die Reinigungslösung aufgetragen werden. Vor dem Desinfizieren muss die Reinigungslösung nach Herstellerempfehlung abgespült werden. Das Desinfektionsmittel wird aufgesprüht oder über Wischtechnik aufgetragen und je nach Herstellerempfehlung ggf. abgespült.

Reinigungslösungen

Es sind pH-neutrale Reinigungsmittel (pH 7) empfohlen. Saure Reiniger (pH 1-6) bzw. alkalische Reiniger (pH 8-14) können Kunststoffteile, Oberflächenbeschichtungen oder Klebeverbindungen angreifen.

Desinfektionsmittel

Zugelassen sind beim Robert-Koch-Institut und beim Verbund für Angewandte Hygiene e.V. gelistete Desinfektionsmittel.

Es sind pH-neutrale Desinfektionsmittel (pH 7) empfohlen. Saure Desinfektionsmittel (pH 1-6) bzw. alkalische Desinfektionsmittel (pH 8-14) können Kunststoffteile, Oberflächenbeschichtungen oder Klebeverbindungen angreifen.

Bezugsteile

Die Bezüge für Sitzgurte, Rückengurte und Sitzkissen sollten im Schonwaschgang bei 30 °C gewaschen werden. Bei höheren Waschttemperaturen können die Bezugsstoffe schrumpfen. Innen liegende Schaumteile, wenn möglich, vorher entnehmen, da auch diese durch den Waschvorgang schrumpfen können. Bei den Schaumteilen empfiehlt sich eine Tauchreinigung bzw. Tauchdesinfektion. Beschädigte Polsterteile müssen ausgetauscht werden. Haftbänder (bei Klettverbindungen) müssen abgedeckt werden, um Oberflächenschäden zu vermeiden. Ist es nicht möglich, die Haftbänder abzudecken, wird eine Handwäsche empfohlen.

Für einzelne Produkte können die Pflegehinweise abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Produktes.